




Schnelles digitales Scannen. Der Patient im Fokus.





EIN KOMPLETT INTEGRIERTER UND VOLLSTÄNDIG VALIDIERTER DIGITALER WORKFLOW VOM SCAN BIS ZUR FERTIGUNG.

Dank des offenen STL-Formats können Sie die Dateien mit Ihren digitalen Abformungen via Straumann® CARES® Connect direkt an Ihren Laborpartner senden.

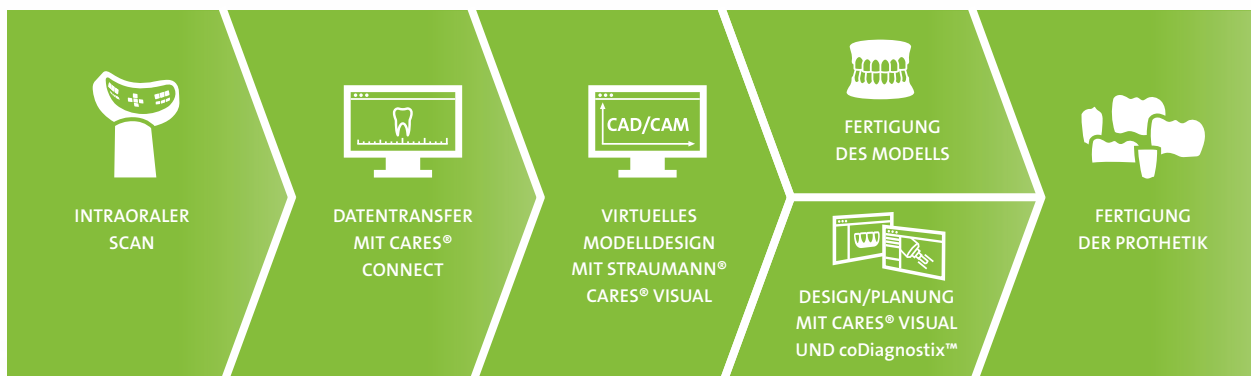

Kleiner Scanner, grosse Flexibilität.

Erleben Sie die Freiheit.

Der Straumann® CARES® Intraoral Scanner basiert auf unserer neuartigen und überaus kompakten 3D-Scan-technologie, dem Multiscan Imaging™. Dies erlaubt Zahnärzten und Klinikern eine schnelle und bequeme digitale Abformung. Das extrem kleine Handstück, derzeit eines der kleinsten Handstücke auf dem Markt, ist besonders patientenfreundlich.

Sprach- und Gestensteuerung machen den Straumann® CARES® Intraoral Scanner zu einem leistungstarken Tool, das Navigationskomfort und Hygiene vereint. Zahnärzte, Zahntechniker und Patienten profitieren von einem digitalen Workflow mit enormer Zeitersparnis gegenüber der klassischen Abformung und damit von mehr Zeit für zufriedene Patienten.



LEISTUNGSSTARKES UND ANWENDERFREUNDLICHES DESIGN FÜR OPTIMALEN PATIENTENKOMFORT

- **Patientenfreundlich** – Sie ersparen Ihren Patienten die oft sehr unangenehme Abformung mit dem Löffel
- **Schnelligkeit** – schneller als die klassische Abformung
- **Fortschrittliche Technologie** – Digitalisierung fasziniert, fesselt Ihre Patienten und motiviert Ihr Mitarbeiter
- **Wirtschaftlichkeit** – effizientere Workflows und zufriedene Patienten steigern die Produktivität Ihrer Praxis

Ersetzen Sie die herkömmliche Abformung durch hochpräzise Scandaten.

Mit dem Straumann® CARES® Intraoral Scanner können Sie schnell und bequem digitale Abformungen für das Design und die Herstellung effektiver Prothetiklösungen generieren. Gegenüber herkömmlichen Abformtechniken, bei denen ein Meistermodell hergestellt und versendet werden muss, können Sie viel Zeit sparen. Digitale Abformungen ersetzen die herkömmlichen, für den Patienten oft sehr unangenehmen Abformtechniken mit dem Löffel und ermöglichen einen deutlich früheren Behandlungsbeginn.



EINFACHE HANDHABUNG

In Hinblick auf Grösse, Form und Haptik sowie das leichte Gewicht ähnelt das komplett aus Metall gefertigte Handstück des Straumann® CARES® Intraoral Scanners dem gewohnten dentalen Winkelstück. Dank der vertrauten Form des Handstücks kann sich der Zahnarzt voll auf den Patienten konzentrieren, statt mit einer der grösseren, unhandlichen Alternativen hantieren zu müssen.



UNÜBERTROFFENER SCANZUGANG

Die Multiscan Imaging™* 3D-Scantechnologie vereint die Leistung von fünf Mini-3D-Scannern in einem der kleinsten intraoralen Handscanner auf dem Markt. Zähne und Weichgewebe werden simultan aus mehreren Scanwinkeln gescannt, sodass auch gewöhnlich schwer zugängliche Bereiche erfasst werden.



DER PATIENT IM FOKUS

Digitale Abformungen mit dem Straumann® CARES® Intraoral Scanner ersetzen die herkömmlichen, für den Patienten oft sehr unangenehmen und zeitaufwendigen Abformtechniken mit dem Löffel und ermöglichen es Ihnen, die Scanergebnisse und Behandlungsoptionen direkt mit Ihrem Patienten zu besprechen, sodass die Gesamtbehandlungsdauer verkürzt wird.



DIGITALE ERGEBNISSE IN ECHTZEIT

Nach erfolgreicher Erfassung der Scandaten leuchtet ein Ring am Handstück auf und es ertönt ein akustisches Signal. Während die Software aus den Scandaten das 3D-Modell rekonstruiert, können Sie die Qualität der Daten in Echtzeit prüfen. Die Daten können Sie anschliessend sofort an Ihr Dentallabor senden.

* Simultane Erfassung der Scandaten aus allen Scanwinkeln dank Multiscan Imaging™.





- Innovative Gestensteuerung – Verschieden Sie sich von herkömmlichen Monitoren mit Touchscreen. Dank Motion-Control-Technologie navigieren Sie mit Ihren sterilen Handschuhen berührungsfrei durch das Bildschirmmenü.



Halten Sie Ihre geöffnete Hand vor den Sensor, → um die Funktion der Gestensteuerung zu aktivieren.




Zeigen Sie mit einem Finger nach oben, → um das Kontextmenü aufzurufen.



Bewegen Sie Ihre geöffnete Hand hin und her, → um durch das Kontextmenü zu navigieren.



Zeigen Sie mit einem Finger nach oben, → um die Navigation zu beenden. Sie können Ihre Hand bewegen, ohne dadurch Ihre Auswahl zu verändern.

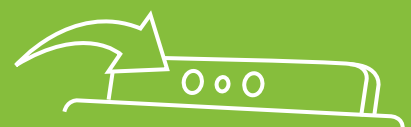

Bewegen Sie Ihre Hand mit dem nach oben zeigenden Finger zum Sensor, → um die Auswahl zu bestätigen.

Komfortable und praktische Bedienung im Handumdrehen.



SIMULTANE ERFASSUNG DER SCANDATEN AUS ALLEN SCANWINKELN DANK MULTISCAN IMAGING™.

- Fünf Hochgeschwindigkeits-Mini-3D-Scanner scannen eine individuelle Einheit in nur 20 Sekunden, einen kompletten Kiefer in 2 Minuten.
- Das offene STL-Format ermöglicht die Übertragung der Daten über unsere cloudbasierte Softwarelösung Straumann® CARES® Connect.

Der Straumann® CARES® Intraoral Scanner ist ein reines chairside Scan-System (Scan only). Für die schnelle Konstruktion und Fertigung der Prothetik wird die digitale Abformung nahtlos wahlweise an ein In-house-System oder an ein externes Fräszentrum übertragen. Scannen und versenden – so einfach ist das.

LEUCHTRING-STATUSANZEIGE AM HANDSTÜCK

Farbe	Handstückstatus
Blinkt, weiss nach blau	Vorheizen
Blau	Vorheizen abgeschlossen
Grün	Scan und Datenerfassung
Rot	Scan ohne Datenerfassung

STRAUMANN® CARES® CONNECT ERMÖGLICHT DIE LÜCKENLOSE
DATENÜBERTRAGUNG UND NACHVERFOLGUNG ALLER
FALLINFORMATIONEN, VOM SCAN BIS ZUR FERTIGUNG UND SORGT FÜR
MAXIMALE PRODUKTIVITÄT UND EFFIZIENZ.

Abbildung Handstück
in Originalgrösse.



Kontaktieren Sie jetzt Ihren zuständigen
Straumann® Außendienstmitarbeiter,
um eine Live-Demonstration zu vereinbaren.



Straumann® CARES® Intraoral Scanner
Leistungsstarkes und anwenderfreundliches Design für optimalen Patientenkomfort



ALLE BROSCHÜREN AUCH
ONLINE VERFÜGBAR
www.straumann.de/mediathek

WIR SIND FÜR SIE DA

TEL.: 0761 / 4501 336

FAX: 0800 / 4501 400

E-Mail: order.de@straumann.com

eShop: www.straumann.de/eshop

International Headquarters

Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

National Distributor

Straumann GmbH
Postfach 6049
79036 Freiburg
Tel.: 0761/4501 0
Fax: 0761/4501 149
www.straumann.de

© Institut Straumann AG, 2016. Alle Rechte vorbehalten.

Straumann® und/oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Wenn Sie der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbe- oder Marktforschungszwecke widersprechen oder eine entsprechend erteilte Einwilligung widerrufen wollen, genügt eine kurze Nachricht per E-Mail an datenschutz.de@straumann.com oder per Post an Straumann GmbH, Abteilung Datenschutz, Jechtinger Str. 9, 79111 Freiburg.

