

Ihr Weg zur  
Straumann® CARES®  
individuellen Prothetik.



# Inhaltsverzeichnis

<b>WAS BEINHALTET STRAUMANN® CARES® INDIVIDUELLE PROTHETIK?</b>	<b>3</b>
Indikationen und Materialien	
<b>WARUM STRAUMANN® CARES® INDIVIDUELLE PROTHETIK WÄHLEN?</b>	<b>4</b>
<b>WAS IST IHRE STRATEGIE FÜR INDIVIDUELLE PROTHETIK?</b>	<b>6</b>
Übersicht der Optionen	
<b>WÄHLEN SIE EINE DIGITALE LÖSUNG, DIE IHRE ANFORDERUNGEN ERFÜLLT</b>	
Option 1: Straumann® CARES® System	8
Option 2: Straumann® CARES® SCAN & SHAPE SERVICE	10
Option 3: 3Shape System	12
Option 4: 3M™ LAVA™ CAD/CAM System	14
Option 5: Dental Wings System	16
Option 6: Straumann Referenzzentren	18
Option 7: exocad System	20
<b>ÜBERBLICK PROTHETISCHE MÖGLICHKEITEN MIT STRAUMANN® CARES®</b>	<b>22</b>

# Was beinhaltet

## Straumann CARES® individuelle Prothetik?

### IMPLANTATGETRAGEN

- Abutments
- Verschraubte Kronen und Brücken

### ZAHNGETRAGEN

- Kronen
- Käppchen
- Brücken
- Inlays / Onlays / Veneers

### MATERIALIEN<sup>1</sup>:


- zerion® LT
- 3M™ ESPE™ LAVA™ Plus
- coron®
- ticon®
- polycon® ae + polycon® cast
- IPS e.max® CAD<sup>2</sup>
- IPS Empress® CAD<sup>3</sup>
- VITA Mark II<sup>4</sup>
- VITA TriLuxe<sup>4</sup>
- 3M™ ESPE™ LAVA™ Ultimate



1 Abhängig von der CAD/CAM-Option  
2 IPS e.max® CAD ist eine eingetragene Marke von Ivoclar Vivadent AG, Lichtenstein  
3 IPS Empress® CAD ist eine eingetragene Marke von Ivoclar Vivadent AG, Lichtenstein  
4 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, 2011

# Warum Straumann CARES® individuelle Prothetik wählen?

Jeder Patient ist einzigartig und jede klinische Situation anders.  
Mit Straumann CARES® individuelle Prothetik können Sie:

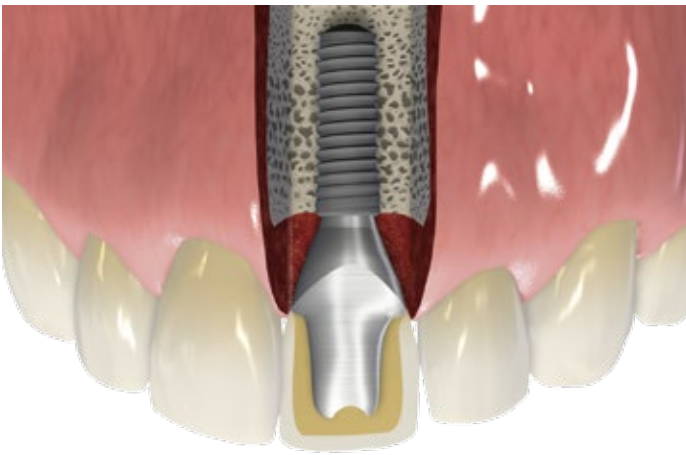

## A. DIE OPTIMALE LÖSUNG FÜR JEDEN PATIENTEN ERREICHEN

- Konstruktion der individualisierten Formen und Angulationen passend für jeden klinischen Fall.
- Patientenspezifisches Austrittsprofil – unterstützt individualisierte Weichgewebekonditionierung und wurde für erfolgreiche ästhetische Ergebnisse entwickelt.
- Hochwertige Materialien, die nur mit CAD/CAM verfügbar sind.

## B. DIE PRODUKTIVITÄT UND RENDITE STEIGERN

- Passgenaue Gerüste garantiert durch einen industriellen Fertigungsprozeß.
- Zentral gefräste Straumann® CARES® Sekundärteile – bereit für die Vorbereitung der endgültigen Versorgung. Kein zusätzlicher Zeitbedarf für die Modifikation konfektionierter Abutments.
- Anatomisch gestaltete Straumann® CARES® Abutments in ZrO<sub>2</sub> und TAN – ermöglichen direkte Verblendung für verschraubte Restaurationen; machen zusätzliche Kappen überflüssig und bieten restaurative Lösungen, die nicht zementiert sind.



## C. QUALITATIV HOCHWERTIGE PROTHETISCHE RESULTATE ERREICHEN

- Originalkomponenten wurden für optimale Leistungsfähigkeit der Implantat-Abutment-Verbindung entwickelt.
- Original-Straumann® Implantat-Abutment-Verbindungen wurden entwickelt, um:
  - die Infiltration von Bakterien und Kontamination in Mikrospalten zu minimieren.
  - für optimale mechanische Leistungsfähigkeit und langfristige Stabilität einer Restauration zu sorgen.
  - die einfache Handhabung von Abutments und Schrauben beim Zusammensetzen zu gewährleisten.
- Industriell gefertigte Materialien weisen hohe Mundbeständigkeit auf.




# Was ist Ihre Strategie...

Mit Straumann® CARES® können Sie zwischen mehreren attraktiven Lösungen wählen, die Ihren Bedürfnissen und Anforderungen gerecht werden. Auf jeden Fall profitieren Sie von der umfangreichen Erfahrung von Straumann in digitaler Zahnheilkunde und zahnärztlicher Implantologie. Jede Straumann® CARES® individuelle Prothetik, die Sie erhalten, basiert auf der bewährten Qualität, der Zahntechniker und Zahnärzte weltweit vertrauen.

**DIE ORIGINALE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG VON STRAUMANN – BEMERKENSWERTE HALTBARKEIT UND LANGLEBIGKEIT, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN.**


Nur Straumann kennt alle Dimensionen, Toleranzen und Materialien von Straumann-Implantaten ganz genau und kann daher das Design zwischen Straumann-Implantaten und ihren entsprechenden Straumann-Prothetikkomponenten optimal abstimmen.

**ES IST IHRE ENTSCHEIDUNG!**

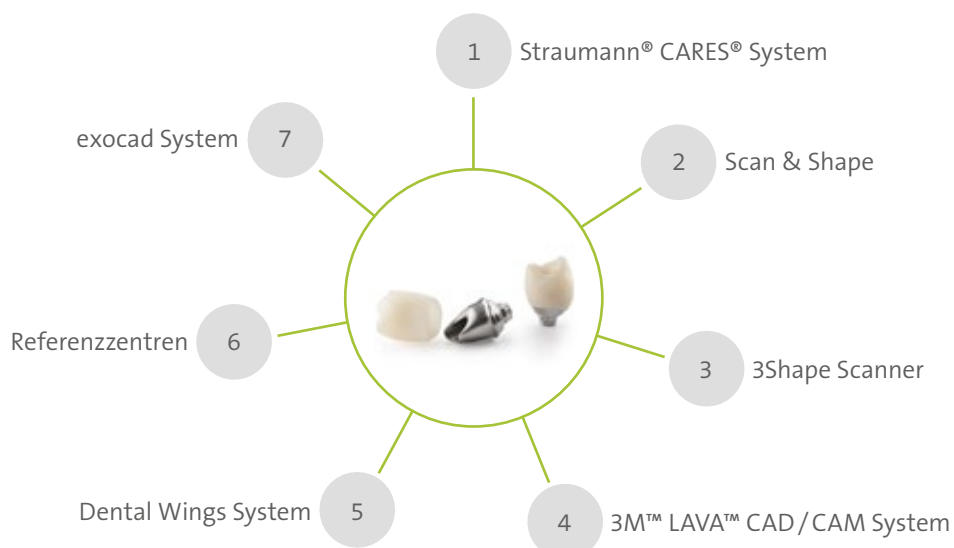

# ...für individuelle Prothetik?


## SIE HABEN DIE WAHL:

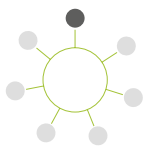

Straumann®  
CARES® System

### NUTZEN SIE EIN STRAUMANN® CARES® SYSTEM


Erwerben Sie das Straumann® CARES® CAD/CAM System, um Zugang zur Straumann® CARES® individuellen Prothetik mit vollständiger Kontrolle über die Scan- und Konstruktionsprozesse in Ihrem Labor zu erhalten. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 8.

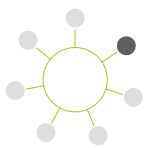

Scan & Shape

### NUTZEN SIE DEN STRAUMANN® CARES® SCAN & SHAPE SERVICE


Straumann bietet Ihnen ein attraktives Kunden-Servicekonzept, um Ihnen unsere individuelle Prothetik zugänglich zu machen. Diese wird von unseren optimal geschulten Mitarbeitern auf der Grundlage Ihrer Angaben gefertigt. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 10.

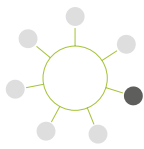

3Shape Scanner

### NUTZEN SIE IHREN 3SHAPE SCANNER


Sie erhalten Zugang zu den CARES® individuellen Prothetiklösungen durch Installation der Straumann® CARES® Materialdatenbank in Ihren bestehenden Softwaremodulen. Der gleiche Konstruktionsprozeß erleichtert Ihnen den Einstieg. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 12.

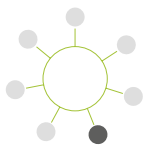

3M™ LAVA™  
CAD/CAM System

### NUTZEN SIE IHR 3M™ LAVA™ CAD/CAM SYSTEM


Die Installation der Straumann® CARES® Materialdatenbank ist kostenfrei und gewährt Ihnen den Zugang zur Straumann® CARES® individuellen Prothetik. CARES® X-Stream™ revolutioniert Ihren Laborablauf: implantatgetragene prothetische Einzelzahn-Restauration in nur einem Schritt. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 14.

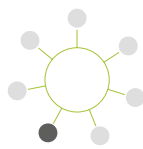

Dental Wings  
System

### NUTZEN SIE IHR DENTAL WINGS SYSTEM

Die CARES® Prothetik App ist für Ihr System entwickelt und enthält den Zugang zur Straumann® CARES® individuellen Prothetik. Nutzen Sie die Möglichkeit, Zahnärzten – die auch Produkte von Straumann nutzen – eine Originalversorgung anbieten zu können. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 16.

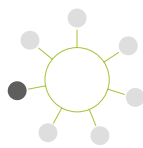

Referenzzentren

### DENTALLABOR OHNE EIGENEN SCANNER – REFERENZZENTRUM

Sie können Ihr individuelles Sekundärteil oder Ihre verschraubten Stege und Brücken über ein Straumann Referenzlabor erstellen lassen. Referenzzentren zur Herstellung von CAD/CAM Implantatprothetik vermittelt Ihnen gerne unser Supportteam. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 18.



exocad System

### NUTZEN SIE IHR EXOCAD-SYSTEM

Sie erhalten Zugang zu den CARES® individuellen Prothetiklösungen durch Installation der Straumann® CARES® Materialdatenbank in Ihren bestehenden Softwaremodulen. Der gleiche Konstruktionsprozeß erleichtert Ihnen den Einstieg. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 20.

# Wählen Sie eine digitale Lösung...

## Option 1

### Steigen Sie um auf digital – mit einem Straumann® CARES® System



#### A. DIE FÄHIGKEIT ZUR DIFFERENZIERUNG ALS DIGITALES LABOR

- Annahme digitaler Abdruckdateien, um Zahnärzte bei der Schaffung digital konstruierter und hergestellter restaurativer Lösungen zu unterstützen.
- Lieferung von CAD/CAM-gestützten restaurativen Lösungen mit hoher Qualität und hervorragender Passform, um sich mit den gelieferten Produkten von anderen Laboren abzuheben.

#### B. ZUGANG ZU EINER BREITEN PALETTE VON MATERIALIEN UND ANWENDUNGEN

- Lieferung von qualitativ hochwertigen zahn- und implantatgestützten prothetischen Restaurationen.
- Förderung innovativer Materialien für zahngetragene prothetische Restaurationen, wie etwa IPS e.max® CAD<sup>1</sup> und 3M™ ESPE™ Lava™ Ultimate Restauration<sup>1</sup>.
- Profitieren von der Straumann-Garantie<sup>2</sup> auf jede hergestellte Kronenkappe, Brückengerüst und individualisierte Abutments.

#### C. DAS POTENZIAL ZUR RENDITESTEIGERUNG

- Belieferung von mehr Kunden mit der gleichen Mitarbeiterzahl durch die Zeitersparnis aufgrund der digitalen CAD/CAM-Arbeitsabläufe.
- Verringerung der manuellen Arbeitsbelastung durch passgenaue Gerüste. Das Aufpassen der Arbeiten bedarf nur eines geringen Zeitaufwand.
- Geringeres Risiko von Wiederholungsarbeiten durch Verwendung kontrollierter und strenger Qualitätsmassnahmen im Rahmen der Straumann® CARES® CAD/CAM Produktionsprozesse.

<sup>1</sup> IPS e.max CAD® ist eine eingetragene Marke von Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein. 3M ESPE Lava™ Ultimate Restauration ist eine eingetragene Marke von 3M oder 3M Deutschland GmbH. Unter Lizenz verwendet in Kanada.

<sup>2</sup> Weitere Einzelheiten finden Sie in der Broschüre über die Straumann-Garantie DE151360.



# ...die Ihre Anforderungen erfüllt.

	Zahngetragene Prothetik										Implantatgetragene Prothetik		
	Einzelzahnrestauration					Brücken			Halteelement		CARES® Individuelles Abutment	CARES® Variobase Abutment	CARES® verschraubte Brücken und Stege
	Kappe	Teilkrone	Krone	Veneer	Inlay/Onlay	Inlay-/Marylandbrücke	Standard Brücke	Unterschnitt Brücke	Teleskop	Geschiebe			
<b>Resin Nano Keramik</b>													
3M™ ESPE™ Lava™ Ultimate Restaurationen				✓	✓								
<b>Keramik</b>													
zerion® LT	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
3M™ ESPE™ LAVA™ Plus	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓	
Zirkoniumdioxid für CARES® individuelle Abutments											✓		
IPS e.max® CAD <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓							✓	
IPS Empress® CAD <sup>2</sup>		✓	✓	✓	✓								
VITA Mark II <sup>3</sup>		✓	✓	✓	✓								
VITA TriLuxe <sup>3</sup>		✓	✓	✓	✓								
<b>Metall</b>													
ticon®	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Titan für CARES® Individuelle Abutments											✓		
Titan für CARES® verschraubte Brücken und Stege													✓
TAN											✓		
coron®	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
<b>Kunststoff</b>													
polycon® ae	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	
polycon® cast	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

- 1 IPS e.max® CAD ist eine eingetragene Marke von Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein.
- 2 IPS Empress® CAD ist eine eingetragene Marke von Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein.
- 3 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, 2011.

# Wählen Sie eine digitale Lösung...

## Option 2

### Nutzen Sie den Straumann® CARES® Scan & Shape Service.

Der Straumann® CARES® Scan & Shape Service bietet Ihnen folgende wichtige Vorteile:




#### A. ZUGANG ZUR ORIGINAL, QUALITATIV HOCHWERTIGER INDIVIDUELLER STRAUMANN® CARES® PROTHETIK MIT MINIMALER UNTERBRECHUNG DES BESTEHENDEN ARBEITSABLAUFS

- Keine Anfangsinvestitionen in spezielle Hard- & Software.
- Kein Erlernen der Arbeit mit Prothetik-Konstruktionssoftware.



#### B. POTENZIAL ZUR RENDITESTEIGERUNG, DA STRAUMANN® SIE MIT OPTIMAL GESCHULTEN CAD/CAM-ZAHNTECHNIKERN UNTERSTÜTZT

- Annahme von mehr CAD/CAM-Aufträgen ohne gesteigerte Laborkosten für zusätzliche Zahntechniker oder spezialisierte Fähigkeiten, die für digitales Konstruieren erforderlich sind.
- Der Techniker kann sich auf die Feinarbeiten bei der Ausarbeitung der Ästhetik der Restaurationen konzentrieren, bevor diese an den Zahnarzt und Patienten zurückgeschickt werden.

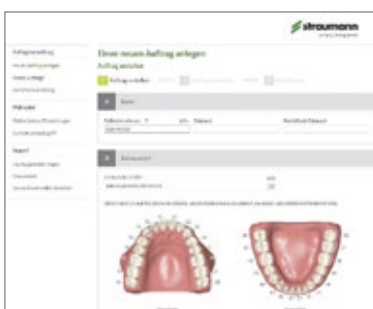

“Webbasierter Bestellprozess”  
Registrierung unter:  
[www.straumann.de/scanandshape](http://www.straumann.de/scanandshape)

#### C. EINFACHHEIT UND QUALITÄT

- Online-Service zur Platzierung, Beurteilung und Nachverfolgung von Aufträgen für mehr Einfachheit.
- Einfacher und effizienter Prozess vom Versand des Modells / Wax-ups bis zum Erhalt der fertigen individualisierten Straumann® CARES® Prothetik.
- Erhalten Sie detaillierte digitale 3D-Designvorschläge von unseren geschulten und erfahrenen CAD/CAM-Zahntechnikern in unserem Straumann® CARES® Scan & Shape Team.
- Profitieren Sie von der Straumann-Garantie<sup>1</sup> auf jedes produzierte individualisierte Abutment.

#### D. VOLLE KONTROLLE DES ENDRESULTATS

- Sie behalten die volle Kontrolle über die endgültige Form Ihrer individuellen Straumann® CARES® Prothetik durch die Genehmigung des digitalen 3D-Designvorschlags.
- Sie können auch Wachsmodellationen der gewünschten Konstruktion erstellen, und wir scannen und produzieren dann die individuelle Prothetik nach Ihren Vorgaben.

<sup>1</sup> Weitere Einzelheiten finden Sie in der Broschüre über die Straumann-Garantie DE151360.

# ...die Ihre Anforderungen erfüllt.

	Zahngetragene Prothetik										Implantatgetragene Prothetik		
	Einzelzahnrestauration					Brücken			Halteelement		CARES® Individuelles Abutment	CARES® Variobase Abutment	CARES® verschraubte Brücken und Stege
	Kappe	Teilkrone	Krone	Veneer	Inlay/Onlay	Inlay-/Marylandbrücke	Standard Brücke	Unterschnitt Brücke	Teleskop	Geschiebe			
<b>Resin Nano Keramik</b>													
3M™ ESPE™ Lava™ Ultimate Restaurationen				✓	✓								
<b>Keramik</b>													
zerion® LT	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
3M™ ESPE™ LAVA™ Plus <sup>4</sup>	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓	
Zirkoniumdioxid für CARES® individuelle Abutments											✓		
IPS e.max® CAD <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓							✓	
IPS Empress® CAD <sup>2</sup>		✓	✓	✓	✓								
VITA Mark II <sup>3</sup>		✓	✓	✓	✓								
VITA TriLuxe <sup>3</sup>		✓	✓	✓	✓								
<b>Metall</b>													
ticon®	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Titan für CARES® Individuelle Abutments											✓		
Titan für CARES® verschraubte Brücken und Stege													
TAN											✓		
coron®	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
<b>Kunststoff</b>													
polycon® ae	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	
polycon® cast	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

- 1 IPS e.max® CAD ist eine eingetragene Marke von Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein.
- 2 IPS Empress® CAD ist eine eingetragene Marke von Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein.
- 3 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, 2011.
- 4 voraussichtlich verfügbar ab August 2015.

# Wählen Sie eine digitale Lösung...

## Option 3

Zugang zu Straumann® CARES® Prothetikkomponenten mit Ihrem **3Shape System**.



### A. VERSCHAFFEN SIE SICH ZUGANG ZU HOCHWERTIGEN PROTHETIKLÖSUNGEN!

- Installation der Straumann® CARES® Materialdatenbank in Ihren bestehenden Softwaremodulen.
- Gleicher Konstruktionsprozess wie bei Ihrer aktuellen Software.
- Keine Schulung erforderlich.

### B. WIE ERHALTE ICH MIT 3SHAPE ZUGANG ZU DEN CARES® PROTHETIKKOMponentEN?

- Laden Sie das unkonfigurierte Basis-Installationsprogramm von Straumann herunter und importieren Sie es in das 3Shape System.
- Für Ihre individuellen Bedürfnisse stehen zwei verschiedene Straumann DME-Datenpakete zur Verfügung:
  1. CARES® Abutment DME
  2. CARES® Tooth-borne DME
- Download-Quelle
  - Option 1 = 3Shape "Download-Center"
  - Option 2 = [www.straumann.com/connect2cares](http://www.straumann.com/connect2cares)
- Bitte stellen Sie sicher, dass Version 2.9.9.1 (oder höher) der 3Shape Software installiert ist.

### C. AUCH VERFÜGBAR: DAS STRAUMANN® VARIOBASE™ IMPLANT KIT

- Option 1: Anbindung in Ihrem System. Bitte stellen Sie sicher, dass Version 2.9.9.1 (oder höher) der 3Shape Software installiert ist.
- Option 2: DME-Datei Straumann Variobase™ als Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie entsprechend Ihrer installierten Software-Version das passende DME-Paket wählen.
- Download-Quelle: [www.straumann.com/connect2cares](http://www.straumann.com/connect2cares)

# ...die Ihre Anforderungen erfüllt.

	Zahngetragene Prothetik										Implantatgetragene Prothetik		
	Einzelzahnrestauration					Brücken			Halteelement		CARES® Individuelles Abutment	CARES® Variobase Abutment	CARES® verschraubte Brücken und Stege
	Kappe	Teilkrone	Krone	Veneer	Inlay/Onlay	Inlay-/Marylandbrücke	Standard Brücke	Unterschnitt Brücke	Teleskop	Geschiebe			
<b>Resin Nano Keramik</b>													
3M™ ESPE™ Lava™ Ultimate Restaurationen				✓	✓								
<b>Keramik</b>													
zerion® LT	✓		✓				✓	✓				✓	
3M™ ESPE™ LAVA™ Plus	✓		✓				✓	✓				✓	
Zirkoniumdioxid für CARES® individuelle Abutments											✓		
IPS e.max® CAD <sup>1</sup>			✓	✓	✓							✓	
IPS Empress® CAD <sup>2</sup>			✓	✓	✓								
VITA Mark II <sup>3</sup>			✓	✓	✓								
VITA TriLuxe <sup>3</sup>			✓	✓	✓								
<b>Metall</b>													
ticon®	✓		✓				✓	✓					
Titan für CARES® Individuelle Abutments											✓		
Titan für CARES® verschraubte Brücken und Stege											✓		
TAN											✓		
coron®	✓		✓				✓	✓				✓	
<b>Kunststoff</b>													
polycon® ae	✓		✓				✓	✓				✓	
polycon® cast	✓		✓				✓	✓					

- 1 IPS e.max® CAD ist eine eingetragene Marke von Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein.
- 2 IPS Empress® CAD ist eine eingetragene Marke von Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein.
- 3 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, 2011.

# Wählen Sie eine digitale Lösung...

## Option 4

Zugang zu Straumann® CARES® Prothetikkomponenten mit Ihrem **3M Lava™ CAD / CAM System.**



### A. VERSCHAFFEN SIE SICH ZUGANG ZU HOCHWERTIGEN PROTHETIKLÖSUNGEN!

- Die Installation der Straumann® CARES® Materialdatenbank ist kostenlos und erfordert keine weiteren Investitionen.
- Möglicher Zugang zu Zahnärzten, die auch Produkte von Straumann nutzen.
- CARES® X-Stream™, die kosteneffiziente Lösung für implantatgetragene prothetische Einzelzahn-Restauration in nur einem Schritt: ein Scan, eine Konstruktion und eine Lieferung.
- Gleicher Konstruktionsprozess wie bei Ihrer aktuellen Software.
- Keine Schulung erforderlich.

### B. WIE AKTIVIERE ICH MEINEN ZUGANG ZU DEN STRAUMANN CARES® PROTHETIKLÖSUNGEN?

- Stellen Sie sicher, dass Version 3.5.3. (oder höher) Ihrer Dental Wings Software installiert ist.
- Kontaktieren Sie den Straumann Support, um Ihren Zugang zu den CARES® Prothetiklösungen zu aktivieren: Telefon 0761 / 4501 336
- Straumann wird Sie anschließend kontaktieren, um Sie als Straumann® CARES® Kunden zu registrieren. Dann sind Sie startbereit!

# ...die Ihre Anforderungen erfüllt.

	Zahngetragene Prothetik										Implantatgetragene Prothetik		
	Einzelzahnrestauration					Brücken			Halteelement		CARES® Individuelles Abutment	CARES® Variobase Abutment	CARES® verschraubte Brücken und Stege
	Kappe	Teilkrone	Krone	Veneer	Inlay/Onlay	Inlay-/Marylandbrücke	Standard Brücke	Unterschnitt Brücke	Teleskop	Geschiebe			
<b>Resin Nano Keramik</b>													
3M™ ESPE™ Lava™ Ultimate Restaurationen				✓	✓								
<b>Keramik</b>													
zerion® LT	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
3M™ ESPE™ LAVA™ Plus	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓	
Zirkoniumdioxid für CARES® individuelle Abutments											✓		
IPS e.max® CAD <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓							✓	
IPS Empress® CAD <sup>2</sup>		✓	✓	✓	✓								
VITA Mark II <sup>3</sup>		✓	✓	✓	✓								
VITA TriLuxe <sup>3</sup>		✓	✓	✓	✓								
<b>Metall</b>													
ticon®	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Titan für CARES® Individuelle Abutments											✓		
Titan für CARES® verschraubte Brücken und Stege													✓
TAN											✓		
coron®	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
<b>Kunststoff</b>													
polycon® ae	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	
polycon® cast	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

- 1 IPS e.max® CAD ist eine eingetragene Marke von Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein.
- 2 IPS Empress® CAD ist eine eingetragene Marke von Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein.
- 3 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, 2011.

# Wählen Sie eine digitale Lösung...

## Option 5

Zugang zu Straumann® CARES® Prothetikkomponenten mit Ihrem **Dental Wings System**.



### A. VERSCHAFFEN SIE SICH ZUGANG ZU HOCHWERTIGEN PROTHETIKLÖSUNGEN!

- Die CARES® Prosthetic App ist kostenlos und erfordert keine weiteren Investitionen.
- Möglicher Zugang zu Zahnärzten, die auch Produkte von Straumann nutzen.
- CARES® X-Stream™, die kosteneffiziente Softwarelösung für implantatgetragene prothetische Einzelzahn-Restauration in nur einem Schritt: ein Scan, eine Konstruktion und eine Lieferung.
- Gleicher Konstruktionsprozess wie bei Ihrer aktuellen Software.
- Keine Schulung erforderlich.

### B. WIE AKTIVIERE ICH DIE VERBINDUNG ZUR CARES® PROSTHETIC APP?

- Stellen Sie sicher, dass Version 3.5. (oder höher) Ihrer Dental Wings Software installiert ist.
- Kontaktieren Sie den Straumann Support, um Ihren Zugang zur CARES® Prosthetic App zu erhalten: Telefon 0761 / 4501 336
- Straumann wird Sie anschließend kontaktieren, um Sie als Straumann® CARES® Kunden zu registrieren. Dann sind Sie startbereit!



# ...die Ihre Anforderungen erfüllt.

	Zahngetragene Prothetik										Implantatgetragene Prothetik		
	Einzelzahnrestauration					Brücken			Halteelement		CARES® Individuelles Abutment	CARES® Variobase Abutment	CARES® verschraubte Brücken und Stege
	Kappe	Teilkrone	Krone	Veneer	Inlay/Onlay	Inlay-/Marylandbrücke	Standard Brücke	Unterschnitt Brücke	Teleskop	Geschiebe			
<b>Resin Nano Keramik</b>													
3M™ ESPE™ Lava™ Ultimate Restaurationen				✓	✓								
<b>Keramik</b>													
zerion® LT	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
3M™ ESPE™ LAVA™ Plus	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓	
Zirkoniumdioxid für CARES® individuelle Abutments											✓		
IPS e.max® CAD <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓							✓	
IPS Empress® CAD <sup>2</sup>		✓	✓	✓	✓								
VITA Mark II <sup>3</sup>		✓	✓	✓	✓								
VITA TriLuxe <sup>3</sup>		✓	✓	✓	✓								
<b>Metall</b>													
ticon®	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Titan für CARES® Individuelle Abutments											✓		
Titan für CARES® verschraubte Brücken und Stege													✓
TAN											✓		
coron®	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
<b>Kunststoff</b>													
polycon® ae	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	
polycon® cast	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

- 1 IPS e.max® CAD ist eine eingetragene Marke von Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein.
- 2 IPS Empress® CAD ist eine eingetragene Marke von Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein.
- 3 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, 2011.

# Wählen Sie eine digitale Lösung...

## Option 6

Labore ohne eigenen Scanner können durch ein Referenzzentrum Straumann® CARES® individuelle Prothetik bestellen.




**SIE KÖNNEN IHR INDIVIDUELLES ABUTMENT, IHRE VERSCHRAUBTEN BRÜCKEN UND STEGE ODER GERÜSTE ÜBER EIN STRAUMANN REFERENZZENTRUM ERSTELLEN LASSEN.**

- Referenzzentren zur Herstellung von Straumann® CARES® individueller Prothetik vermittelt Ihnen gerne unser Supportteam. Nehmen Sie hierzu mit uns Kontakt auf: Telefon 0761 / 4501 336
- Auf unserer Website finden Sie die Funktion: "Ihr Labor Partner". Hier haben Sie die Möglichkeit, selbst nach einem Referenzlabor in Ihrer Nähe zu suchen.

**SIE ARBEITEN BEREITS MIT EINEM STRAUMANN SCANNER?**

- Nutzen Sie diese Website und lassen Sie sich als Referenzlabor registrieren. Nehmen Sie für die Registrierung mit unserer Marketingabteilung Kontakt auf: Telefon: 0761 / 4501 450, E-Mail: [onlinemarketing.de@straumann.com](mailto:onlinemarketing.de@straumann.com)

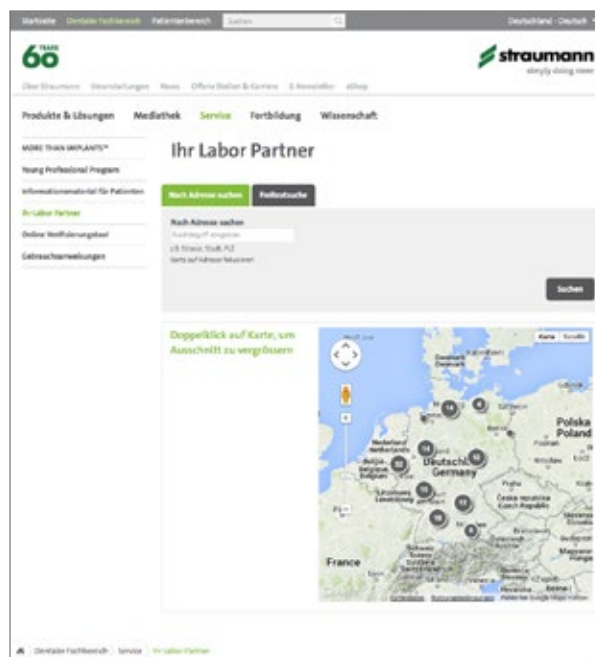

# ...die Ihre Anforderungen erfüllt.

	Zahngetragene Prothetik										Implantatgetragene Prothetik		
	Einzelzahnrestauration					Brücken			Halteelement		CARES® Individuelles Abutment	CARES® Variobase Abutment	CARES® verschraubte Brücken und Stege
	Kappe	Teilkrone	Krone	Veneer	Inlay/Onlay	Inlay-/Marylandbrücke	Standard Brücke	Unterschnitt Brücke	Teleskop	Geschiebe			
<b>Resin Nano Keramik</b>													
3M™ ESPE™ Lava™ Ultimate Restaurationen				✓	✓								
<b>Keramik</b>													
zerion® LT	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
3M™ ESPE™ LAVA™ Plus	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓	
Zirkoniumdioxid für CARES® individuelle Abutments											✓		
IPS e.max® CAD <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓							✓	
IPS Empress® CAD <sup>2</sup>		✓	✓	✓	✓								
VITA Mark II <sup>3</sup>		✓	✓	✓	✓								
VITA TriLuxe <sup>3</sup>		✓	✓	✓	✓								
<b>Metall</b>													
ticon®	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Titan für CARES® Individuelle Abutments											✓		
Titan für CARES® verschraubte Brücken und Stege													✓
TAN											✓		
coron®	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
<b>Kunststoff</b>													
polycon® ae	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	
polycon® cast	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

- 1 IPS e.max® CAD ist eine eingetragene Marke von Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein.
- 2 IPS Empress® CAD ist eine eingetragene Marke von Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein.
- 3 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, 2011.

# Wählen Sie eine digitale Lösung...

## Option 7<sup>1</sup>

Zugang zu Straumann® CARES® Prothetikkomponenten mit Ihrem **exocad System**.

# exocad

### A. VERSCHAFFEN SIE SICH ZUGANG ZU HOCHWERTIGEN PROTHETIKLÖSUNGEN!

- Installation der Straumann® CARES® Materialdatenbank in Ihren bestehenden Softwaremodulen.
- Gleicher Konstruktionsprozess wie bei Ihrer aktuellen Software.
- Keine Schulung erforderlich.

### B. WIE ERHALTE ICH MIT EXOCAD ZUGANG ZU DEN CARES® PROTHETIKKOMPONENTEN?

- Laden Sie die Straumann Datenbanken für exocad herunter und importieren Sie diese in Ihr exocad System.
- Download-Quelle  
[www.straumann.com/connect2cares](http://www.straumann.com/connect2cares)
- Folgen Sie der Anleitung „Straumann® CARES® Anbindung der exocad CAD/CAM Systeme“.
- Bei Fragen kontaktieren Sie bitte den technischen Support von Straumann unter: 0761 / 4501-336.

### C. AUCH VERFÜGBAR: DAS STRAUMANN® VARIOBASE™ IMPLANT KIT

- Fräsen Sie Variobase™ Kappen und Kronen auf Original Straumann Abutments.
- Download-Quelle  
[www.straumann.com/connect2cares](http://www.straumann.com/connect2cares)

<sup>1</sup> voraussichtlich verfügbar ab August 2015.

# ...die Ihre Anforderungen erfüllt.

	Zahngetragene Prothetik										Implantatgetragene Prothetik		
	Einzelzahnrestauration					Brücken			Halteelement		CARES® Individuelles Abutment	CARES® Variobase Abutment	CARES® verschraubte Brücken und Stege
	Kappe	Teilkrone	Krone	Veneer	Inlay/Onlay	Inlay-/Marylandbrücke	Standard Brücke	Unterschnitt Brücke	Teleskop	Geschiebe			
<b>Resin Nano Keramik</b>													
3M™ESPE™Lava™ Ultimate Restaurationen													
<b>Keramik</b>													
zerion® LT	✓		✓				✓	✓					
3M™ ESPE™ LAVA™ Plus	✓		✓				✓	✓					
Zirkoniumdioxid für CARES® individuelle Abutments											✓		
IPS e.max® CAD <sup>1</sup>													
IPS Empress® CAD <sup>2</sup>													
VITA Mark II <sup>3</sup>													
VITA TriLuxe <sup>3</sup>													
<b>Metall</b>													
ticon®	✓		✓				✓	✓					
Titan für CARES® Individuelle Abutments											✓		
Titan für CARES® verschraubte Brücken und Stege													
TAN											✓		
coron®	✓		✓				✓	✓					
<b>Kunststoff</b>													
polycon® ae	✓		✓				✓	✓					
polycon® cast	✓		✓				✓	✓					

- 1 IPS e.max® CAD ist eine eingetragene Marke von Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein.
- 2 IPS Empress® CAD ist eine eingetragene Marke von Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein.
- 3 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, 2011.

# Überblick

## prothetische Möglichkeiten mit Straumann® CARES®



	Zahngetragene Prothetik																										
	Kappe / Krone										Brücke					Inlay / Onlay / Veneer											
	zerion® LT	3M™ ESPE™ LAVA™ Plus	IPS e.max® CAD	IPS Empress® CAD	VITA Mark II	VITA TriLuxe	3M™ ESPE™ Lava™ Ultimate	ticon®	coron®	polycon® ae	polycon® cast	zerion® LT	3M™ ESPE™ LAVA™ Plus	ticon®	coron®	polycon® ae	polycon® cast	zerion® LT	3M™ ESPE™ LAVA™ Plus	IPS e.max® CAD	IPS Empress® CAD	VITA Mark II	VITA TriLuxe	3M™ ESPE™ Lava™ Ultimate	ticon®	coron®	polycon® ae
Straumann CS2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scan & Shape	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dental Wings	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3M Espe Lava	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3 shape	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
exocad <sup>1</sup>	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											



	Implantatgetragene Prothetik											
	CARES® Abutment				SRBB		CARES® Variobase					Kit
	Zirkon	Titan	TAN	Abutment X-Stream	ticon®	coron®	zerion® LT	3M™ ESPE™ LAVA™ Plus	IPS e.max® CAD	coron®	polycon® ae	Variobase Implant Kit
Straumann CS2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Scan & Shape	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
Dental Wings	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3M Espe Lava	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3 shape	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	✓
exocad <sup>1</sup>	✓	✓	✓									✓

1 Voraussichtlich verfügbar ab August 2015





ALLE BROSCHÜREN AUCH  
ONLINE VERFÜGBAR  
[www.straumann.de/mediathek](http://www.straumann.de/mediathek)

### WIR SIND FÜR SIE DA

TEL.: 0761 / 4501 336

FAX: 0761 / 4501 400

E-Mail: [cadcam.support.de@straumann.com](mailto:cadcam.support.de@straumann.com)

eShop: [www.straumann.de/eshop](http://www.straumann.de/eshop)



Bestellen, wann Sie wollen.

[www.straumann.de/eshop](http://www.straumann.de/eshop)

#### International Headquarters

Institut Straumann AG  
Peter Merian-Weg 12  
CH-4002 Basel, Switzerland  
Phone +41 (0)61 965 11 11  
Fax +41 (0)61 965 11 01  
[www.straumann.com](http://www.straumann.com)

#### National Distributor

Straumann GmbH  
Jechtinger Straße 9  
79111 Freiburg  
Tel.: 0761/4501 0  
Fax: 0761/4501 149  
[www.straumann.de](http://www.straumann.de)

© Institut Straumann AG, 2015. Alle Rechte vorbehalten.

Straumann® und/oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und/oder ihrer verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.