

VERKLEBEN EINER STRAUMANN® CARES® VARIOBASE™ KAPPE MIT EINEM STRAUMANN® VARIOBASE™ ABUTMENT



**STRAUMANN®
VARIOBASE™
KOMPONENTEN**



SCHRITT 1



SCHRITT 2



SCHRITT 3



Zement-
überschuss
entfernen

SCHRITT 4



**STRAUMANN® CARES®
VARIOBASE™ SEKUNDÄRTEIL,
VERKLEBT**

1. Montieren Sie das Straumann® Variobase™ Sekundärteil mit einer Schraube auf dem Manipulierimplantat und ziehen Sie diese handfest an. Verschließen Sie den Schraubenkanal mit Wachs.
2. Tragen Sie selbsthärtenden Kleber auf das Straumann® Variobase™ Sekundärteil auf.
3. Kleben Sie die Straumann® CARES® Variobase™ Kappe auf das Straumann® Variobase™ Sekundärteil (Straumann empfiehlt Panavia* F2).
4. Entfernen Sie sofort überschüssigen Kleber vom Sekundärteil.

Hinweis: Detaillierte Anweisungen zum Verkleben, zur Handhabung sowie zur Platzierung des Straumann® Variobase™ Sekundärteils entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Beipackzettel.



**STRAUMANN® CARES®
VARIOBASE™
SEKUNDÄRTEIL**

* Panavia F2.0 ist eine registrierte Marke von KURARAY CO., LTD Japan

** Legierung Titan Aluminium-6 Niob-7