

Checkliste zur Aufstellung

Straumann® CARES® M-Series

1/2

✓	Abklären vor der Installation
	Besteht eine funktionierende Internetverbindung in der Nähe des Aufstellplatzes und kann eine Verbindung zum CAD/CAM-PC hergestellt werden?
	Sind alle Vorbereitungen zum Anschließen getroffen (Löcher gebohrt, Kabel gelegt)?
	Ist bei Verwendung einer systemfremden Absaugung für die M-Series geklärt, dass entsprechende Adapter vorhanden sind und die Länge des Absaugschlauches ausreichend ist?
	Liegt eine Ansteuerung der systemfremden Absaugung vor (9 poliger D-Sub-Stecker)?
	Gibt es einen Druckluftanschluss für die M-Series, an dem konstant mindestens 6 bar ankommen und der Kompressor min. 50 l/min Ansaugleistung liefert?
	Der mitgelieferte Druckluftschlauch hat eine Länge von ca. 1,80 m. Bitte prüfen, ob dies ausreichend ist. Wenn nicht, muss der Kunde eine Verlängerung mit Kupplung besorgen.

✓	Erhalt und Anschließen des Systems
	Checken, ob der Schock- und Kippsensor an der Verpackung ausgelöst hat
	Kiste öffnen (entweder mit Kreuzschlitzdreher oder Akkuschauber)
	mit Monitor, Tastatur und Maus verbinden
	mit PC verbinden
	optional: M-Series mit PC verbinden
	optional: Cool-Stream anschließen
	vor dem Hochfahren des PCs – Scanner einschalten!
	PC hochfahren und über „Language Selector“ Systemsprache einstellen
	Termin mit 1st Level Support vereinbaren

✓	Installation aller Software-Komponenten
	Internetverbindung herstellen und sofort:
	Antivirensoftware installieren (hierzu wird eine Email-Adresse des Kunden und ein von Ihm gewähltes Passwort benötigt)
	optional: Installation der Cares Visual Software
	Installation der CAM-Software
	Updates installieren
	optional: M-Series, nach Verbinden mit dem PC, einschalten und den Treiber installieren (Hardware-Assistent)
	optional: ggf. Netzwerkverbindung zur Motion herstellen
	Am Ende aller Installationsarbeiten: Einstellung der Sprache mit dem „Language Selector“

✓	Anmeldung des Systems
	Anmeldung im 1st Level Support (Kundendaten notwendig)

Checkliste zur Aufstellung Straumann® CARES® M-Series

2/2

✓	Inbetriebnahme von Cares Visual und M-Series
	optional: Starten der M-Series-SW
	optional: Übertragen der Testwürfel-Fräsdatei auf die Maschine und fräsen dieser Datei ➔ Erklärung für den Kunden
	optional: Überprüfen des Testwürfels, ggf. Abklärung mit 1st Level Support

✓	Schulung des Kunden (vom Anlegen eines Falls bis zur fertigen Arbeit)
	Erklären der Database (Wie lege ich einen Fall richtig an?)
	Erklären der verschiedenen Indikationen
	Durchführung eines Scans und Erklärung für den Kunden
	Erklären der DWOS anhand des Beispiels
	optional: Übergabe des Beispiels an die CAM-Software und diese erklären
	optional: Fräsdatei in der CAM-Software auf die Maschine übertragen
	optional: Fräsen des Beispielfalls in Wachs oder Temp, um gleich die Passung kontrollieren zu können
	optional: Erklären der Reinigung und des Reinigungsintervalls der Spindel
	optional: Auf Service und Wartung der M-Series hinweisen
	optional: Erklärung des Therm/Argotherm



Stempel

Datum | Unterschrift Kunde

Datum | Unterschrift Straumann Mitarbeiter

Datenschutzhinweis: Ohne Ihre weitergehende Einwilligung verwenden die Straumann GmbH, Freiburg (D), das Institut Straumann AG, Basel (CH) und deren Dienstleister Ihre Angaben für Zwecke der Abwicklung Ihrer Bestellungen und Anfragen, für Kundenanalysen und schriftliche Werbung per Post. Unsere Geschäftskunden werden auch telefonisch über unsere Produkte, Dienstleistungen sowie über Kundenzufriedenheitsbefragungen und Veranstaltungen informiert. Wenn Sie der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbe- oder Marktforschungszwecke widersprechen oder eine entsprechend erteilte Einwilligung widerrufen wollen, genügt eine kurze Nachricht per E-Mail an datenschutz.de@straumann.com oder per Post an Straumann GmbH, Abteilung Datenschutz, Jechtinger Str. 9, 79111 Freiburg.

Straumann® und/oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.