

Patienteninformationen  
über die Nachsorge bei einer  
Zahnfleischbehandlung

Hinweise  
zur Nachbehandlung  
Straumann® Emdogain®

Wie Sie nach dem chirurgischen Eingriff vorgehen sollten:



Nach der Behandlung mit Straumann® Emdogain® sollte die Heilung im Zahnfleisch so ungestört wie möglich ablaufen.

Während dieser Heilungsphase sollten Sie folgendes beachten. Um den Prozess der Wundheilung nicht zu beeinflussen, sollten Sie die Zähne im Wundbereich in den ersten Tagen nicht putzen.

## **DIE FOLGENDEN EMPFEHLUNGEN BEGLEITEN SIE DURCH DIE ERSTEN WOCHEN NACH DER BEHANDLUNG.**

### **Woche 1 bis 3**

- Mehrmals täglich eine keimreduzierende (aseptische) Mundspülung anwenden
- Behandelte Stelle nicht mit der Zahnbürste reinigen
- Zahnzwischenräume um und an der behandelten Stelle nicht reinigen
- Auf Alkohol, Nikotin, Kaffee, schwarzen Tee und Frischmilchprodukte verzichten
- Kauen auf der behandelten Stelle vermeiden
- Harte und feste Speisen vermeiden



#### **Woche 4 bis 6**

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
- Weiterhin mehrmals täglich eine keimreduzierende (aseptische) Mundspülung anwenden
- Behandelte Stelle vorsichtig mit der Zahnbürste reinigen
- Zahnzwischenräume an der behandelten Stelle nicht reinigen
- Zahnreinigung durch zahnmedizinisches Fachpersonal durchführen lassen

#### **Ab der 7. Woche**

- Zähne und Zahnzwischenräume an der behandelten Stelle vorsichtig mit der Zahnbürste reinigen
- Regelmässige Kontrolluntersuchungen und Zahnreinigung durch zahnmedizinisches Fachpersonal durchführen lassen

Je nach individuellen Gegebenheiten kann die Vorgehensweise in den ersten Wochen nach der Behandlung variieren. Aus diesem Grund muss der behandelnde Zahnarzt die Patientin oder den Patienten darüber informieren, wie sie bzw. er sich in dieser Phase zu verhalten hat und wie wichtig es ist, sich gewissenhaft an diese Empfehlungen zu halten. Der behandelnde Zahnarzt wird regelmässige Kontrolluntersuchungen mit Ihnen vereinbaren, um den Fortschritt der Heilung zu beurteilen. Wir empfehlen, die oralhygienischen Massnahmen und regelmässigen Kontrolluntersuchungen nach Abschluss der Regenerationsbehandlung fortzusetzen.

**LASSEN SIE SICH VON IHREM ZAHNARZT ODER  
EINEM IMPLANTOLOGISCH TÄTIGEN SPEZIALISTEN  
KOMPETENT UND INDIVIDUELL BERATEN:**



Um mehr über die Produkte und Lösungen von Straumann zu erfahren, besuchen Sie [www.straumann.de/patienten](http://www.straumann.de/patienten) und fragen Sie Ihren Zahnarzt.

Die auf diesen Seiten enthaltenen Informationen sollen dazu dienen, Grundwissen zum Thema Zahnfleischbehandlungen zu vermitteln. Sie können in keiner Weise die fachliche Beratung durch einen qualifizierten Zahnarzt ersetzen.

Eine Information von:

**Straumann GmbH**

Postfach 6049

79036 Freiburg

© Institut Straumann AG, 2016. Alle Rechte vorbehalten.

Straumann® und/oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und/oder ihrer verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.