

Optimale Pflege für Ihre
implantatgetragenen Zähne.

Nr. 1

Zahnimplantate von
Straumann – die
Nr. 1 in Deutschland



Mehr als eine Versorgung. Neue Lebensqualität.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihren neuen Zähnen.

Implantate von Straumann sind eine ausgezeichnete Wahl und Investition. Für den Erfolg der Behandlung ist die Pflege Ihrer Implantate wichtig. Denn genauso wie natürliche Zähne benötigen Zahnimplantate regelmäßige Kontrollen und eine gewissenhafte Mundhygiene. Wenn Sie die folgenden Richtlinien beachten, können Ihre Implantate über Jahrzehnte funktionsfähig bleiben.



Nachsorge: Was ist zu beachten?

- Was Sie in der Zeit unmittelbar nach der Operation wissen und tun müssen,
- was Sie vermeiden sollten,
- wann Sie Ihren Zahnarzt kontaktieren müssen,
- wie Sie Ihre neuen Zähne pflegen, damit sie Ihnen lange erhalten bleiben.

Maßnahmen während der Einheilungsphase.

WAS SIE NACH DER OPERATION WISSEN UND TUN SOLLTEN.

Kühlen Sie mit einem feuchten Tuch

Kühlen Sie das Behandlungsareal so bald wie möglich nach dem Eingriff von außen mit einem feuchten Tuch, um Schmerzen und einer Schwellung entgegenzuwirken.

Nehmen Sie Ihre Medikamente ein

Wenn Ihr behandelnder Zahnarzt ein Medikament verschrieben hat, nehmen Sie dieses entsprechend den Anweisungen des Arztes unmittelbar ein.

Mundspülungen: Seien Sie vorsichtig

In den ersten Stunden nach dem Eingriff sollten Sie Ihren Mund nicht spülen, da dies Blutungen verursachen kann. Sie können jedoch gleich nach der Behandlung in kleinen Schlucken Wasser trinken (keinen Alkohol, keine heißen Getränke).

Ihre provisorische Versorgung: Bitte achten Sie darauf

Während das Implantat in Ihrem Mund einheilt, könnte es mit einer Einheilkappe oder einem provisorischen Zahnersatz versehen sein. Eine Einheilkappe wird auf das Implantat gesetzt, damit das Zahnfleisch abheilen kann, bevor der nächste Schritt Ihrer Behandlung erfolgt. Sie sollten auf der Seite des Implantats nichts Hartes kauen. So kann das Implantat sicher einheilen und ist bereit für den nächsten Schritt in Ihrer Behandlung.

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN.

- Sitzen ist besser als Liegen. Halten Sie Ihren Kopf während des Tages aufrecht, auch nachts wird eine leicht erhöhte Kopflage empfohlen. Sie sollten sich nicht auf die Seite legen, auf der das Implantat gesetzt wurde.
- Sie sollten in den ersten Stunden nach dem Eingriff kein Fahrzeug führen. Ihre Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr könnte durch das Betäubungsmittel oder andere Medikamente beeinträchtigt sein. Fragen Sie hierzu Ihren Zahnarzt.

- Verwenden Sie im Bereich des Implantats keine Zahnbürste, bis die Fäden entfernt wurden. Ihr Zahnarzt wird Ihnen empfehlen, statt Zähneputzen mehrmals am Tag eine Mundspülung vorzunehmen.
- Sie sollten nichts essen, bis die Wirkung des Betäubungsmittels abgeklungen ist.
- In den ersten Tagen nach dem Eingriff sollten Sie Alkohol, Nikotin, Kaffee und schwarzen Tee meiden.
- Auch Sport und körperliche Anstrengungen sollten Sie in den ersten Tagen nach dem Eingriff vermeiden.

WANN SIE IHREN ZAHNARZT KONTAKTIEREN SOLLTEN.

Komplikationen nach dem Einsetzen eines Zahnimplantats sind selten – die Behandlung ist in der Regel ein Routineeingriff. Die Fäden werden meistens sieben bis zehn Tage nach Einsetzen des Implantats entfernt. Die Lösungen von Straumann wurden gründlich erforscht und wissenschaftlich erprobt, jedoch kann es trotzdem im Einzelfall Nebenwirkungen geben. Es ist daher sehr wichtig, dass Sie schnellstmöglich Ihren Zahnarzt aufsuchen, wenn Sie folgende Symptome oder Nebenwirkungen bei sich beobachten:

- pulsierende Schmerzen am Tag des Eingriffs,
- taubes Gefühl an der Implantationsstelle 12 Stunden nach dem Eingriff,
- Schmerzen oder Schwellung an der Implantationsstelle mehrere Tage nach dem Eingriff,
- Auftreten einer erneuten Blutung,
- gelockerter provisorischer Zahn,
- wenn Sie Symptome oder Fragen haben, die in dieser Broschüre nicht erwähnt werden.

Achten Sie auf Ihre neuen Zähne.

Schöne Zähne dank guter Pflege

Was für natürliche Zähne gilt, gilt auch für Zahnimplantate. Zahnimplantate können nur bei sorgfältiger Mundpflege lange halten. Genau wie bei Ihren natürlichen Zähnen kann sich Zahnstein ablagern und Ihrem Implantat schaden. Verwenden Sie für die Reinigung Ihrer Zähne eine weiche Zahnbürste (die Sie regelmäßig wechseln) oder eine elektrische Zahnbürste. Zusätzlich sollten Sie auch die vom Ihrem Zahnarzt empfohlenen Hilfsmittel wie Interdentalbürsten für die Reinigung der Zahnzwischenräume verwenden. Die Zähne sind von außen, von innen und oben auf den Kauflächen zu putzen.

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


Eine Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihrem Zahnarzt

Regelmäßige Kontrolluntersuchungen und Prophylaxe beim Zahnarzt sind notwendig. Ihr Zahnarzt wird mit Ihnen ein individuelles Zahnpflegeprogramm besprechen. Fragen Sie ihn nach der geeigneten Putztechnik – so wissen Sie genau, wie Sie Ihre Zähne am besten pflegen können. Eine sorgfältige Pflege und Kontrolluntersuchungen (zweimal pro Jahr) tragen dazu bei, dass Ihr Zahnimplantat jahrelang fest sitzt.



LASSEN SIE SICH VON IHREM ZAHNARZT ODER EINEM IMPLANTOLOGISCH TÄTIGEN SPEZIALISTEN KOMPE- TENT UND INDIVIDUELL BERATEN:



Um mehr über die Produkte und Lösungen von Straumann zu erfahren, besuchen Sie www.straumann.de/patienten und fragen Sie Ihren Zahnarzt.

Die auf diesen Seiten enthaltenen Informationen sollen dazu dienen, Grundwissen zum Thema Zahnimplantate zu vermitteln. Sie können in keiner Weise die fachliche Beratung durch einen qualifizierten Zahnarzt ersetzen.

Eine Information von:

Straumann GmbH
Heinrich-von-Stephan-Str. 21
79100 Freiburg



www.straumann.de/patienten
Einfach QR-Code mit Ihrem
Smartphone einscannen.

© Institut Straumann AG, 2017. Alle Rechte vorbehalten.

Straumann® und/oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und/oder ihrer verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.